

DRAIN CLEAN SINK



HUOLTOTOIMENPITEET:

Laitteisto koostuu kahdesta osasta. Ne ovat tasaussäiliö ja amalgaamierotin. Altaan alapuolella oleva tasaussäiliö on kiinni neljällä pikalukolla joiden ansiosta säiliö on helposti irrotettavissa mahdollisten roskien poistoa ja pesua varten. Altaaseen kaadetaan työpäivänpäätyttyä desinfiointiainetta jonka annostelu on sama kuin tehomurin ja jolla estetään levän muodostuminen ja bakteerikanta pysyy mahdollisimman alhaisella tasolla. Mikäli ongelmia esiintyy, voi desinfiointiaineen väkevyyttä lisätä 50-100%. On myös huomioitava, että yöksi ja lomalle lähettäessä olisi erottimeen syytä jättää desinfiointiainetta niin, että sen kaatamisen jälkeen ei huuhdeltaisi vedellä. Purkkien täyttymistä on hyvä tarkkailla kuukauden välein. Se tapahtuu parhaiten aamulla, kun purkeissa oleva neste on rauhassa selkiintynyt. Veden virtaamissuuntaan nähden kertyy suurin osa amalgaamijätteestä ensimmäiseen purkkiin. Kun se on täyttynyt merkki viivan asti on purkit vaihdettava, tai muussa tapauksessa vähintään kerran vuodessa. Jätteen sekaan kaadetaan hiukan vastaanotolla käytettävää desinfiointiainetta ja kansi kierrätään kiinni. Purkkeja vaihdettaessa on hyvä pitää alapuolella vatia tai vastaavaa. Oy Lindström Consulting Ab ottaa purkit sellaisenaan vastaan ja toimittaa uusia tilalle.

Oy Lindström Consulting Ab
TEOLLISUUSKATU 2 B
08150 LOHJA

PUH. 019-323 150
FAX. 019-323 170

WWW.lindstromconsulting.fi
E-Mail: info@lindstromconsulting.fi